

LE HAMEÇON

Un objet imaginé
par les soignants
du GH Paris-
Saclay AP-HP !



Le Hameçon est un crochet universel pour **faciliter l'accroche des poches à serum sur tous les modèles de potence de lits** disponibles au marché.

Chaque Hameçon commandé permet d'économiser 50 à 150 € en fonction du coût du pied à perfusion qu'il remplace.

Code SAP : 10709257



NETTOYAGE



Matériel et produits :

- Protection de l'agent (produit nettoyant désinfectant SURFANIOS PREMIUM ou autre, gants à usage unique, tablier de protection)
- HDM par friction hydroalcoolique

RÈGLE D'UTILISATION



- Produit adapté aux dimensions des potences de lit
- Ne pas utiliser l'objet pour un autre usage que celui auquel il est destiné.
- S'assurer du bon état de l'objet avant d'installer une poche à serum
- L'état du Hameçon doit être vérifié mensuellement
- Rapporter tout élément d'usure, de casse ou incident se référant au numéro de série : SIM10Q5000-HAM

Fablab Héphaïstos
CHU de Bicêtre AP-HP
78 Rue du Général Leclerc,
94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 45 21 23 86 - fablab.apsaclay@aphp.fr

NOTICE D'UTILISATION

Le Hameçon est à installer sur la potence de lit du patient. Celui-ci-ci doit être positionné crochet vers le bas.

Le Hameçon peut supporter des poches à serum pour les perfusions dans une limite maximale de 4 kg.

LE FABLAB HÉPHAÏSTOS



Le Fablab HÉPHAÏSTOS est un **tiers-lieu d'innovation et de fabrication numérique** à destination des professionnels du groupe hospitalo-universitaire Paris-Saclay AP-HP.

Il accompagne la création de solutions **facilitant le quotidien des usagers** dans les services de soin de l'Hôpital : soignants, agents et patients.



CRÉER DES **OUTILS**
DE SOIN SUR-MESURE



ÉTENDRE LA **DURÉE DE**
VIE DES ÉQUIPEMENTS

fablab.apsaclay@aphp.fr
01 45 21 23 86
www.fablab-hospitalier.fr

SCANNEZ LE CODE POUR
DÉCOUVRIR D'AUTRES PROJETS !



AMÉLIORER L'**ACCUEIL**
& L'EXPÉRIENCE PATIENT



FAVORISER LA
COHÉSION D'ÉQUIPE



LE HAMEÇON

Un objet imaginé
par les soignants
du GH Paris-
Saclay AP-HP !



Le Hameçon est un crochet universel pour **faciliter l'accroche des poches à serum sur tous les modèles de potence de lits** disponibles au marché.

Chaque Hameçon commandé permet d'économiser **50 à 150 €** en fonction du coût du pied à perfusion qu'il remplace.

NETTOYAGE



Matériel et produits :

- Protection de l'agent (produit nettoyant désinfectant SURFANIOS PREMIUM ou autre, gants à usage unique, tablier de protection)
- HDM par friction hydroalcoolique

RÈGLE D'UTILISATION



- Produit adapté aux dimensions des potences de lit
- Ne pas utiliser l'objet pour un autre usage que celui auquel il est destiné.
- S'assurer du bon état de l'objet avant d'installer une poche à serum
- L'état du Hameçon doit être vérifié mensuellement
- Rapporter tout élément d'usure, de casse ou incident se référant au numéro de série : *S1M10Q5000-HAM*

Fablab Héphaïstos
CHU de Bicêtre AP-HP
78 Rue du Général Leclerc,
94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 45 21 23 86 - fablab.apsaclay@aphp.fr



NOTICE D'UTILISATION

Le Hameçon est à installer sur la potence de lit du patient. Celui-ci-ci doit être positionné crochet vers le bas.

Le Hameçon peut supporter des poches à serum pour les perfusions dans une limite maximale de 4 kg.